

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**  
**USER MANUAL OF ALUMINUM ALLOY FOLDING STRETCHER**

**I. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Parameters:**

1. **Διαστάσεις Προϊόντος (Μ/Π/Υ) / Product Size (LxWxH):** 221x53x15cm
2. **Διαστάσεις Προϊόντος Διπλωμένο (Μ/Π/Υ) / Folding Size (LxWxH):** 110x18x11cm
3. **Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ/Π/Υ) / Carton Size (2pcs) ::**112x18x22cm
4. **Βάρος Προϊόντος / N.W:** 5kg **G.W:**11kg
5. **Ανοχή Βάρους / Loading Bearing:** ≤159kg

**II. Οδηγίες Χρήσης / How to use:**

Το πτυσσόμενο φορείο είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής κράμα αλουμινίου και αδιάβροχα συνθετικά υλικά. Αυτό το φορείο μπορεί να διπλωθεί σε μήκος και πλάτος, εύκολο για μεταφορά και αποθήκευση. Το πορτοκαλί ύφασμα είναι ανθεκτικό στη φωτιά,

ανθεκτικό στο νερό, αντιρρυπαντικό και εύκολο να καθαριστεί. **The folding stretcher is made of high strength aluminum alloy material and the waterproof leather materials. This stretcher with outrigger can be folded in length and width, easy for transportation and storage. The orange fabric is fire proof, water proof, anti-cracking and easy to clean.**

**III. Ενδεικνυομένη Χρήση / Applications:**

Εγκεκριμένο από ειδικευμένους νοσοκόμους, είναι κατάλληλο για ασθενοφόρο, γυμναστήριο, για να μεταφέρει τους τραυματίες & τους ασθενείς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες γενικές εφαρμογές. **Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.**

**IV. Προφυλάξεις / Cautions:**

1. Όταν μεταφέρετε ασθενείς με αυτό το φορείο, βεβαιωθείτε ότι ασφαλίσετε καλά τη ζώνη ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.
2. Σε συνθήκες γενικής χρήσης, προσέξτε να μην σκιστεί η επιφάνεια του φορείου.

1. **When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly fasten the safety belt for safety sake.**
2. **In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.**

**V. Συντήρηση / Maintenance:**

1. Καθαρίζετε τακτικά με ήπιο απολυμαντικό
2. Επιθεωρήστε το τακτικά για τυχόν «χαλαρωμένα» κινούμενα μέρη.

1. **Keep clean as routine (incl. sterilization).**
2. **Often check if any parts loose or not.**

**VI. Αποθήκευση & Μεταφορά / Storage & transportation:**

1. Αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρο καθαρό, ασφαλή από κτυπήματα, υγρασία και από λοιπές αλλοιώσεις.
2. Η μεταφορά του προϊόντος δεν απαιτεί ειδικό όχημα ή άλλες ειδικές συνθήκες.

1. **Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.**
2. **Common transporting vehicle can carry this product.**

