

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ/ Commode Wheelchairs User
Manual

0808378, 0806777, 0808396, 0806063, 0810120, 0806053, 0808370



Τα αμαξίδια παραδίδονται συναρμολογημένα & έτοιμα προς χρήση./ Commode Wheelchairs are delivered assembled & ready for use.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/INSTRUCTIONS FOR USE

Τα αμαξίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα **ΕΝΤΟΣ** σπιτιού./ Commode Wheelchairs can be used by people with limited mobility inside the house.

Τα αμαξίδια **ΔΕΝ** ενδείκνυνται για χρήση **ΕΚΤΟΣ** σπιτιού./ Commode Wheelchairs **CANNOT** be used OUTSIDE the house.

Πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι/ Before using the Commode Wheelchair make sure that:

- Το κάθισμα εφαρμόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση./ The seat is correctly placed and secure in this position.
- Το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή./ The tank is correctly placed into the appropriate slot.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό./ There are no cracks or fractures in the frame.

MOBIAK A.E
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece
+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr Email: mobiakcaresales@mobiak.gr



Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα./ If trouble occurs in any of the above DO NOT use the commode wheelchair until the problem is resolved .

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ FURTHER INSTRUCTIONS

- Τα αμαξίδια διαθέτουν φρένο στους πίσω τροχούς το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο όταν το αμαξίδιο δεν κινείται./ The wheelchairs have brake on the rear wheels which must be secured when the wheelchair does not move.
- Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε το αμαξίδιο να μένει ακίνητο και να μη γλιστρά./ When sitting or standing up from the wheelchair push the handles down, securing that it will stand still and not slip.
- ΜΗΝ πατάτε πάνω στα υποπόδια για να καθίσετε ή να σηκωθείτε, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ανατροπής. Τα υποπόδια χρησιμεύουν για να πατεί τα πόδια ο χρήστης όταν είναι καθισμένος./ DO NOT step on the foot rests to sit or get up, roll RISK . The footrests are used to place the user's feet when seated.
- Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη η τραυματισμό./ When you get out of the walker must rely on both handles equally. Leaning only to one handle (without escort) can cause injury or damage the product.
- Να καθαρίζετε τακτικά το αμαξίδιο./ Regularly clean the wheelchair.
- Μην αφήνετε το αμαξίδιο βρεγμένο./Do not let the wheelchair wet.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη./ Do not let children near the wheelchair without supervision

Εγγύηση/Warranty:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.

MOBIAK A.E
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece
+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr Email: mobiakcaresales@mobiak.gr

