



karma

mobility solutions

Εγχειρίδιο λειτουργίας Saber | Saber TR (Saber series)

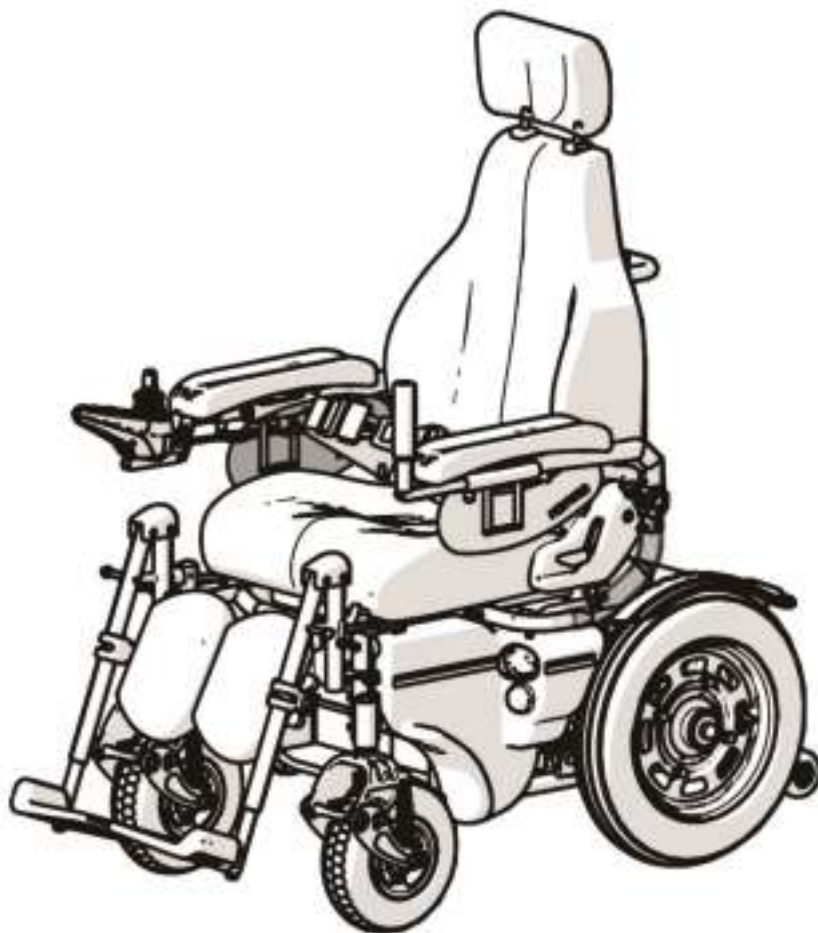

■ Σήμανση

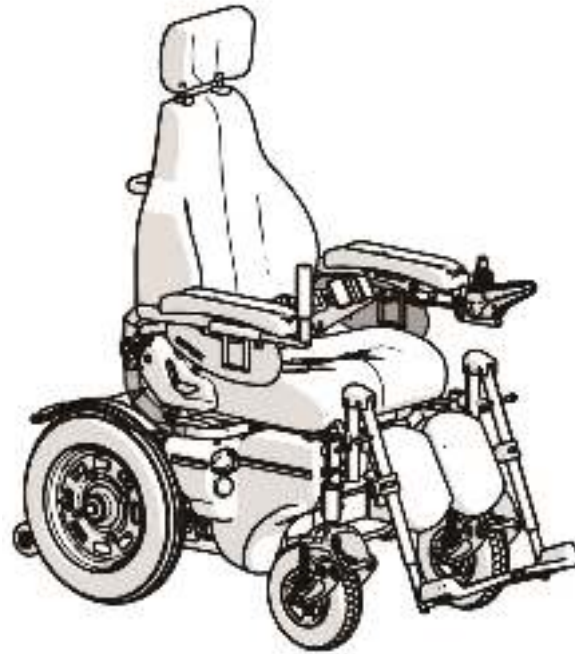

Το αμαξίδιο φέρει σήμανση



■ Ταυτότητα αμαξιδίου

Κωδικός \ Μοντέλο:

Μέγεθος:

Χρώμα:

SN:

Διάφορα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

■ Προφυλάξεις ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτροκίνητο σας.

Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλάβετε ή αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η **ORTHOSTATISI** δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τραυματισμούς και ζημιές που προκλήθηκαν από μη συμμόρφωση στις οδηγίες και προειδοποιήσεις του εγχειριδίου.

■ Γενικά

Το αμαξίδιο αυτό δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τις μετακινήσεις σας.

Η **ORTHOSTATISI** προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων που σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες του χρήστη. Καθώς αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το αμαξίδιό σας, είναι πιθανό να συναντήσετε καταστάσεις στις οποίες θα χρειαστείτε πρακτική. Σιγά-σιγά θα αποκτήσετε απόλυτο και σίγουρο έλεγχο του αμαξιδίου σας καθώς το κατευθύνετε ανάμεσα από πόρτες, μέσα και έξω από ασανσέρ, σε χαλί, σε κεκλιμένα επίπεδα κλπ.


■ Εγκατάσταση - Συναρμολόγηση - Χρήση

- Ξεβιδώνοντας την στρόφιγγα που φαίνεται στην φωτογραφία Φ1 σηκώνουμε το κάθισμα προς τα πίσω και τοποθετούμε τις μπαταρίες σύμφωνα με την συνδεσμολογία στο σχεδιάγραμμα Φ2. Ρίχνουμε το κάθισμα και ξαναβιδώνουμε (σε περίπτωση που δεν είναι τοποθετημένες)

Φώτο 1



Φώτο 2

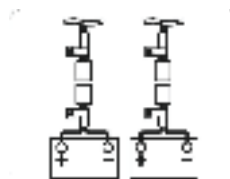

- Τοποθετούμε τα υποπόδια, στα οποία ρυθμίζεται το ύψος των πελμάτων (Φ1) χαλαρώνοντας την βίδα στο κάτω μέρος και ξανασφίγγοντας. Επίσης έχουμε ρύθμιση της κλίσης των υποποδίων (Φ2)

Φώτο 1



Φώτο 2



- Σηκώνουμε την πλάτη και την ρυθμίζουμε στην επιθυμητή κλίση, είτε με τον μοχλό που βρίσκεται αριστερά και στο πίσω μέρος του καθίσματος, είτε με το χειριστήριο σε περίπτωση Saber TR
- Τοποθετούμε το χειριστήριο εάν δεν είναι τοποθετημένο και ελέγχουμε το καλώδιο της παροχής ρεύματος αν είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρονική

- Τοποθετούμε τα πλαϊνά (σε περίπτωση που δεν είναι), τα οποία ρυθμίζονται ως προς το ύψος τους, στις αντίστοιχες υποδοχές (Φ1). Τα πλαϊνά σε περίπτωση που χρειαστεί είναι αποσπώμενα (Φ2)

Φώτο 1



Φώτο 2



- Ελέγχουμε εαν το αμαξίδιο είναι σε θέση κίνησης. Τότε δεν κινείται χειροκίνητα παρά μόνο με την χρήση του χειριστηρίου. Σε περίπτωση χειροκίνητης χρήσης του αμαξιδίου, τραβήξτε τους μοχλούς των τροχών προς τα έξω (Φ1) και γυρίστε τους 45° μπρός τα εμπρός. Το αμαξίδιο κινείται ελεύθερα. Για να τους επαναφέρουμε σε θέση κίνησης, απλά μετακινήστε τους μοχλούς προς τα μπροστά μέχρι να ακουστεί ο ήχος κλειδώματος των τροχών.

Φώτο 1



- Τοποθετούμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, τα ροδάκια ανατροπής (Φ1)

Φώτο 1



- Πατώντας το κουμπί έναρξης (on/off) του χειριστηρίου, ελέγχουμε εάν είναι φορτισμένη η μπαταρία (στην ένδειξη πράσινο) (**Βλέπε Μπαταρίες και φόρτιση**).

■ Μετατροπές - Αξεσουάρ

Το αμαξίδιο σας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή άνεση. Μια μεγάλη ποικιλία από επιπλέον εξαρτήματα είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ζητηθούν, όπως στήριγμα κεφαλής, μαξιλάρια κατά των κατακλίσεων κ.α. Το αμαξίδιο σας επιδέχεται μετατροπών για ακόμη μεγαλύτερη άνεση-στήριξη (βλέπε **Ρυθμίσεις για άνεση**).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τροποποιήσετε το αμαξίδιο σας κατά τρόπο μη εξουσιοδοτημένο από την **ORTHOSTATISI**. Μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβες για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν είμαστε υποχρεωμένοι για την αντικατάστασή τους από τυχόν εγγύηση που έχει το αμαξίδιο.

■ Έλεγχος πριν την χρήση

Αρχίστε να εξοικειώνεστε με τις δυνατότητες του ηλεκτροκίνητου σας.

Η **ORTHOSTATISI** συνιστά να κάνετε έναν έλεγχο πριν από κάθε χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιο λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

Να εκτελείτε λοιπόν τους κάτωθι ελέγχους προτού ξεκινήσετε:

- Ελέγξτε ότι τα ελαστικά είναι κατάλληλα φουσκωμένα. Διατηρήστε πίεση 3 bar στα εμπρός ελαστικά (σε περίπτωση μη συμπαγών ελαστικών) και 3 bar στα πίσω (βλέπε ενδείξεις επάνω στα ελαστικά). Τα σωστά φουσκωμένα ελαστικά διευκολύνουν κατά πολύ την κίνηση του αμαξιδίου σας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην φουσκώνετε τα ελαστικά πολύ παραπάνω από το όριο το οποίο αναγράφουν καθώς υπάρχει κίνδυνος σκασίματος.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Σιγουρευτείτε ότι είναι σφιγμένες σωστά και δεν έχουν οξειδωθεί.
- Κάντε έλεγχο του χειριστηρίου σας και ταυτόχρονα της ισχύς της μπαταρίας.

■ Πληροφορίες κλίσης

Καθημερινά θα αντιμετωπίζετε επιφάνειες με διάφορες κλίσεις (ράμπες, δρόμους κλπ.) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του 1990 για Α.Μ.Ε.Α, όλες οι ράμπες στις οποίες έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρίες, απαιτούν μεγιστη κλίση 5°.

Η **ORTHOSTATISI** συνιστά οι κλίσεις τις οποίες μπορείτε να κατεβείτε και να ανεβείτε με ασφάλεια να μην υπερβαίνουν το 8°. **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Οποιαδήποτε απόπειρα να ανεβείτε ή να κατεβείτε κάποια κλίση πιο απότομη από την προτεινόμενη, μπορεί να προκαλέσει ανατροπή για την οποία η **ORTHOSTATISI** δεν φέρει καμία ευθύνη.

Όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε κάποια κλίση να θυμάστε:

- Αποφεύγετε απότομα σταματήματα και ξεκινήματα.
- Σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό δώστε κλίση στο σώμα σας προς τα εμπρός όταν ανεβαίνετε μια ανηφόρα .
- Όταν ανεβαίνετε κάποια κλίση προσπαθήστε το αμαξίδιο σας να βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Εάν πρέπει να σταματήσετε, ξεκινήστε πάλι αργά.
- Όταν κατεβαίνετε κάποια κλίση, έχετε τον ρυθμιστή ταχύτητας στην πιο αργή βαθμίδα για να εξασφαλίσετε ελεγχόμενη κάθοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ανεβαίνετε κάποιο κεκλιμένο επίπεδο μην κάνετε ζιγκ-ζαγκ, ούτε να οδηγείτε σε γωνία σε σχέση με την κλίση (πλαγίως).

■ Οδήγηση σε εξωτερικό χώρο

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σας έχει σχεδιαστεί να παρέχει άριστη σταθερότητα υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, δηλαδή σε στεγνές ομαλές επιφάνειες από τσιμέντο ή ασφαλτο.

Η **ORTHOSTATISI** αναγνωρίζοντας ότι θα συναντήσετε και άλλους τύπους επιφανειών και συνθηκών σας ενημερώνει ότι το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο σας τα καταφέρνει καλά και σε πατημένο χώμα, γρασίδι, χαλίκι και βρεγμένη ασφαλτο.

Να θυμάστε ότι:

- Αποφύγετε το υψηλό γρασίδι το οποίο μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή στους τροχούς και τα μοτέρ. Σε περίπτωση οδήγησης σε τέτοια επιφάνεια φροντίστε για τον καθαρισμό των τροχών και μοτέρ με την απομάκρυνση των χόρτων.
- Ελαττώστε ταχύτητα όταν οδηγείτε σε ανώμαλο έδαφος ή μαλακές επιφάνειες.
- Αποφύγετε το αραιό χαλίκι και την άμμο.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε επιφάνεια στην οποία δεν νοιώθετε ασφαλής.

■ Προφυλάξεις για δριμύ καιρό - κακοκαιρία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η **ORTHOSTATISI** συνιστά να μην οδηγείτε το αμαξίδιο σας σε παγωμένους ή γλιστερούς ή σε αλατισμένους δρόμους. Τέτοια χρήση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία και ασφάλεια του αμαξιδίου σας και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε το αμαξίδιο σας ποτέ σε κανενός είδους υγρασία (βροχή, χιόνι, ομίχλη ή νερά πλυσίματος), μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη.

■ Ρυθμίσεις για άνεση

Στο αμαξίδιο σας μπορεί να γίνουν αφού χρειαστεί οι παρακάτω ρυθμίσεις για μεγαλύτερη άνεση. Καλό είναι αυτές οι ρυθμίσεις να γίνουν κατά την αγορά του αμαξιδίου από την προμηθεύτρια εταιρία.

Ρύθμιση ύψους υποποδίων

Βλέπε Εγκατάσταση - Συναρμολόγηση.

Ρύθμιση βάθους υποποδίων

Βλέπε Εγκατάσταση - Συναρμολόγηση.

Ρύθμιση ύψους πλαϊνών

Βλέπε Εγκατάσταση - Συναρμολόγηση.

Ρύθμιση κλίσης πλάτης

Στην έκδοση Saber ο μοχλός ρύθμισης της κλίσης της πλάτης βρίσκεται αριστερά στο πίσω μέρος του καθίσματος (Φ1). Τραβώντας τον μοχλό προς τα επάνω με το ένα χέρι, με το άλλο ρυθμίστε την επιθυμητή κλίση και αφήστε τον μοχλό. Στην έκδοση Saber TR η κλίση ρυθμίζεται από το χειριστήριο.

Φώτο 1



Ρύθμιση βάθους και ύψους χειριστηρίου

Πολύ εύκολα χαλαρώνοντας τη στρόφιγγα (Φ1) στη βάση που μπαίνει το χειριστήριο και μετακινώντας εμπρός ή πίσω. Για το ύψος του χειριστηρίου, ξεβιδώστε τις βίδες και ρυθμίστε (Φ2).

Φώτο 1



■ Ξεσυναρμολόγηση (μεταφορά)

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο το οποίο επιλέξατε έχει πτυσσόμενη πλάτη και αφαιρούμενα υποπόδια

■ Μπαταρίες και φόρτιση

Το ηλεκτροκίνητο αμαξιδίό σας χρησιμοποιεί δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κλειστού τύπου 12V η κάθε μια. Οι μπαταρίες λόγω του ότι είναι κλειστού τύπου δεν χρειάζονται συντήρηση.

Παρόλο που μοιάζουν με μπαταρίες αυτοκινήτου, δεν αντικαθιστώνται από αυτές.

Για να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, σας δίνεται φορτιστής ο οποίος είναι κατάλληλος για αυτήν και μόνο την χρήση. Η «δύναμη» της μπαταρίας φαίνεται στο χειριστήριο στον μετρητή της μπαταρίας (ενδείξεις με βούλες από κόκκινο έως πράσινο για την πλήρη φόρτιση).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην φορτίζετε τις μπαταρίες με άλλον φορτιστή, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Επίσης μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για να βάλετε στην πρίζα τον φορτιστή της μπαταρίας σας. Βάλτε τον φορτιστή απευθείας σε πρίζα τοίχου.

Για να φορτίσετε τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον φορτιστή:

- Σιγουρευτείτε ότι **το χειριστήριο είναι κλειστό** (δεν έχει ενδείξεις) και ότι οι μοχλοί που απελευθερώνουν τους τροχούς είναι σε θέση εμπλοκής.
- Βάλτε το καλώδιο του φορτιστή με το βύσμα στην υποδοχή του χειριστηρίου και μετά την πρίζα στον τοίχο. Ανοίξτε τώρα τον φορτιστή.
- Η φόρτιση διαρκεί 6-10 ώρες.
- Όταν ανάψει το πράσινο φωτάκι τότε έχουμε μια πλήρη φόρτιση.

Φροντίστε για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας:

- 1.** Να μην αποφορτίζονται ποτέ πλήρως.
- 2.** Να φορτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνονται όσο το δυνατόν πλήρης φορτίσεις (μην φορτίζεται τις μπαταρίες σας για μια-δυο ώρες αλλά για όλο το βράδυ).
- 3.** Η φόρτιση να γίνεται κατά προτίμηση στο τέλος της ημέρας (τέλος χρήσης του αμαξιδίου) και εάν έχουν σβήσει τα πράσινα λαμπάκια.
- 5. Φορτίζουμε όταν έχουμε ένδειξη πορτοκαλί.**
- 4.** Κόκκινο λαμπάκι δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή στο σπίτι, σημαίνει όμως απαραίτητη πλήρη φόρτιση κατά την επιστροφή.
- 6.** Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης του αμαξιδίου για μεγάλο χρονικό διάστημα φροντίστε η αποθήκευσή του να γίνεται σε χώρο όπου δεν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες (ψύχος, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία), να είναι πλήρως φορτισμένο και να κάνετε μια πλήρη φόρτιση κάθε 60 ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ζωή της μπαταρίας αντανakλά την περιποίηση που δέχεται.

■ Δημόσια μεταφορά

Οι κλειστού τύπου μπαταρίες είναι σχεδιασμένες για χρήση σε ηλεκτροκίνητα αμαξίδια.

Αυτές οι μπαταρίες είναι ασφαλείς για μεταφορά με όλα τα μεταφορικά μέσα.

Καλό είναι να ξεσυνδέσετε το κουτί με την σύνδεση του χειριστηρίου.


Τέλος συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την διεύθυνση του μεταφορικού μέσου (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αεροπορική μεταφορά).

■ Χειριστήριο

Το χειριστήριο με το οποίο είναι εξοπλισμένο το αμαξίδιο σας είναι ένα χειριστήριο πλήρες, το οποίο συνδέεται με την ηλεκτρονική - εγκέφαλο του αμαξιδίου που βρίσκεται στο κουτί των μπαταριών.

Το χειριστήριο απαρτίζεται από:

1. Ένδειξη μπαταρίας και διαγνωστικό βλαβών
2. Πλήκτρο on/off
3. Δείκτης φωτισμού
4. Πλήκτρο κόρνας
5. Πλήκτρο φωτισμου
6. Ένδειξη ταχύτητας
7. Πλήκτρο αύξησης ταχύτητας
8. Δείκτης δεξιού φλας
9. Πλήκτρο δεξιού φλάς
10. Δείκτης αλάρμ
11. Πλήκτρο αλάρμ
12. Πλήκτρο μείωσης ταχύτητας
13. Δείκτης αριστερού φλάς
14. Πλήκτρο αριστερού φλάς
15. Πλήκτρο Tilt
16. Δείκτης Tilt
17. Δείκτης ανάκλισης πλάτης

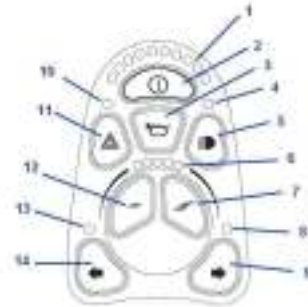

[χωρίς TILT]



[με TILT]

Μοχλός

Ο μοχλός του χειριστηρίου ελέγχει την κατεύθυνση και την ταχύτητα του αμαξιδίου. Όταν μετακινείτε τον μοχλό από την ουδέτερη θέση, τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα απελευθερώνονται και επιτρέπουν στο αμαξίδιο να κινηθεί. Όσο πιο μακριά από την κεντρική θέση σπρώχνετε τον μοχλό, τόσο πιο γρήγορα κινείται η καρέκλα σας. Όταν αφήσετε τον μοχλό να επιστρέψει στην αρχική ουδέτερη θέση, τότε συνδέονται τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα και η καρέκλα επιβραδύνει και σταματάει τελείως.

Πλήκτρο ON/OFF (2)

Είναι το κύριο πλήκτρο το οποίο ανοίγει και κλείνει το χειριστήριο

Πλήκτρο κόρνας (4)

Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί την κόρνα

Πλήκτρο φωτισμού (5)

Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί τον φωτισμό του αμαξιδίου

Πλήκτρα αυξομείωσης ταχύτητας (7/12)

Με το αριστερό πλήκτρο μειώνουμε την ταχύτητα και με το δεξί την αυξάνουμε. Κατώτερη ταχύτητα η μία κόκκινη βούλα και ανώτερη η πέντε στην οποία το αμαξίδιο σε ιδανικές συνθήκες μπορεί να πιάσει τα 6 km/h

Μετρητής φορτίου κατάστασης μπαταρίας (1)

Ο μετρητής αυτός βρίσκεται πάνω στο χειριστήριο ακριβώς μπροστά από τον μοχλό. Είναι μια φωτιζόμενη οθόνη 10 ψηφίων η οποία δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας, του χειριστηρίου και του ηλεκτρικού συστήματος.

- Κόκκινα, κίτρινα, πράσινα φώτα αναμμένα

Φορτισμένη μπαταρία, χειριστήριο και ηλεκτρικό σύστημα ΟΚ.

- Κόκκινα και κίτρινα φώτα αναμμένα

Μπαταρία ελαφρώς ξεφόρτιστη, χειριστήριο και ηλεκτρικό σύστημα ΟΚ.

Φορτίστε στο τέλος της ημέρας

- Μόνο κόκκινα φώτα αναμμένα ή αργό αναβόσβημα

Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο, χειριστήριο και ηλεκτρικό σύστημα ΟΚ

- Αναβόσβημα των φώτων LED

Υποδεικνύει βλάβη στο χειριστήριο ή στο ηλεκτρικό σύστημα.

Επικοινωνήστε με την **ORTHOSTATISI**.

- Τρεμούλιασμα (πάνω-κάτω) των φώτων

Ο μοχλός δεν ήταν στην ουδέτερη θέση όταν ανοίγατε το χειριστήριο. Κλείστε το χειριστήριο και ξαναοιζτε αφήνοντας τον μοχλό να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Σε περίπτωση που τα φώτα συνεχίζουν να τρεμουλιάζουν επικοινωνήστε με την **ORTHOSTATISI**.

- Σύνδεσμος χειριστηρίου

Αυτός συνδέει το χειριστήριο με τις μπαταρίες του αμαξιδίου σας και τα μοτέρ

■ Γενικές οδηγίες

- Μη χτυπάτε το χειριστήριο
- Μην εκθέτετε το αμαξίδιο σας σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Διατηρείτε καθαρό το χειριστήριο
- Ελέγχετε τις συνδέσεις του χειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές και σφιγμένες.
- Φουσκώνετε τακτικά τα ελαστικά σας για καλύτερη κίνηση του αμαξιδίου σας, όχι όμως πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που αναγράφονται επάνω τους.
- Αποφεύγετε να κινήστε σε δρόμους με υψηλές κλίσεις, υψηλότερες από τις προδιαγραφές του αμαξιδίου. Η **ORTHOSTATISI** δεν φέρει καμία ευθύνη για ατύχημα από ανατροπή του αμαξιδίου.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δεν παρεμβαίνουμε ποτέ στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του αμαξιδίου χωρίς πρώτα να απευθυνθούμε στην **ORTHOSTATISI**.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δεν πειράζουμε συνεχώς και χωρίς λόγο τους μοχλούς κομπλαρίσματος και ξεκομπλαρίσματος των μοτέρ. Είναι μόνο για ειδικές περιπτώσεις (βλάβη, χωρίς μπαταρία κλπ.) Όταν θέλουμε να μετακινήσουμε το αμαξίδιο το κάνουμε με την χρήση του χειριστηρίου
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δεν ρίχνουμε νερά στο αμαξίδιο (ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική), ούτε το πλένουμε με το λάστιχο κλπ.

■ Service - Ανταλλακτικά

Η **ORTHOSTATISI** παρέχει service και ανταλλακτικά (λάστιχα, σαμπρέλες, μπαταρίες κλπ.) για αμαξίδιο ή ορθοστάτη που αγοράσατε από αυτήν καθώς και μια σειρά από αξεσουάρ για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε. Υπάρχουν και ανταλλακτικά άλλων εταιριών.

Θέση σφραγίδας πωλητή

